

## Hinweise Einsender

### Liquid Biopsy Analytik (qPCR, NGS)

Bei der Blutentnahme und dem Versand sind für eine qualitativ hochwertige Diagnostik folgende Punkte zu beachten:

#### 1. Inhalt der Verpackung

- ▶ BCT-Blutentnahme-Röhrchen (Streck®) mit Schutzgefäß
- ▶ Adapter zur Blutentnahme

#### 2. Probenmaterial

- ▶ je 1 BCT-Blutentnahme-Röhrchen (Streck®) pro Patient  
(Röhrchen beschriftet, vollständig gefüllt, mehrfach invertiert)

#### 3. Lagerbedingungen

- ▶ Lagerung der Blutproben in der Rücksendebox bei Raumtemperatur  
(nicht < 4°C)


#### 4. Versand

- ▶ BCT-Blutentnahme-Röhrchen (Streck®) möglichst am selben Tage der Blutentnahme versenden

#### 5. Anleitung Blutentnahme

*(je 10ml Blut / BCT-Röhrchen, je Patient\*in 10ml Blut / 1 BCT-Röhrchen)*

- ▶ Etikett beschriften, auf den unteren Bereich des Röhrchens kleben.
- ▶ Die Blutröhrchen vollständig mit je 10ml Blut füllen.
- ▶ Die Röhrchen nach der Blutentnahme **unbedingt** 10x invertieren, sodass sich das entnommene Blut mit dem Reagenz im BCT-Röhrchen mischt.

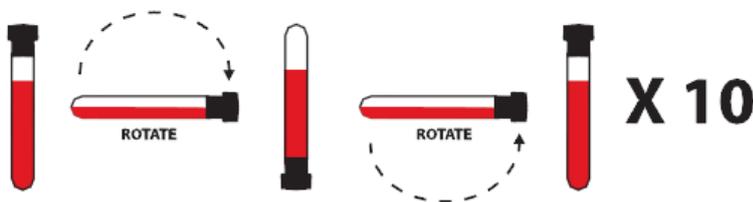

- ▶ Nach der Blutentnahme die Röhrchen entsprechend der Temperaturanforderungen beschriftet verpacken.

